


# 使用 BD Veritor 检测试剂盒 自己在家进行快速新冠病毒 (COVID-19) 检测

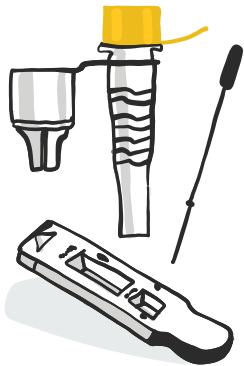

## 检测试剂盒包含:

- 鼻拭子
- 试管, 装有少量透明液体
- 检测盒

## 您将需要:


- 干净、平整的台面
- 纸巾
- 洗手液
- 计时器或时钟

## 开始之前,


- 请清洗手。
- 将纸巾铺在干净、平整的表面上
- 打开检测试剂盒内的物品。
- 将检测盒从包装袋中取出。
- 如果超过一个人做检测, 请用记号笔或铅笔在试管上写下您的名字。
- **扫描此二维码, 观看教学视频**




<https://backtoschool.ednet.ns.ca/kidcovidtest>

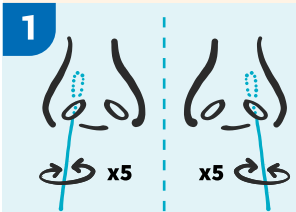


1 将拭子放入鼻孔内约 2 厘米处。将拭子用力擦拭并旋转 5 次, 对另一个鼻孔重复此操作 (您可能会流眼泪)。

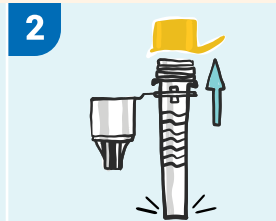

2 轻轻敲击试管, 使液体流到底部。小心地取下黄色盖子, 注意不要使液体溢出、飞溅或与之接触。

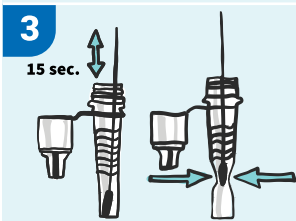

3 轻轻地将拭子头部放入液体中, 上下搅动 15 秒。捏住拭子周围的试管, 挤出拭子上残留的液体。丢弃拭子。

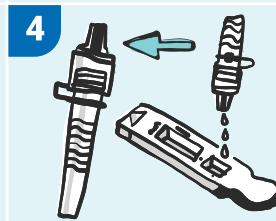

4 将附带的盖子盖在试管上。轻轻地挤 3 滴液体到检测盒的小孔中。将检测盒放置在平整的台面上 15 分钟。

**注意!** 在线条出现, 显示结果的区域会变成红色, 然后变回白色。

## 结果

### 阴性

**C(控制线)标志处出现一条线, T(检测线)标志处无线条出现。**

单次阴性结果不能用于排除有症状者的新冠病毒感染情况。48 小时后再次进行检测。如果您是密切接触者, 则不应使用该检测, 而应遵循公共卫生部门的检测指南。

### 阳性

**C(控制线)标志处出现一条线, T(检测线)标志处出现一条线。**

#### 您必须:

- 立即隔离
- 发送电邮到 [PublicHealthPOCT@nshealth.ca](mailto:PublicHealthPOCT@nshealth.ca), 将您的阳性结果告知公共卫生局, 包括您的姓名、出生日期、健康卡号码和联系信息 (注意: 此电子邮件账户仅接收阳性结果通知)。
- 请前往 <https://covid-self-assessment.novascotia.ca/en> 或致电 811 预约新冠病毒检测。
- 在进行阴性确认检测或接到公共卫生部门的电话获得更多信息之前, 请保持隔离。

**无效:** 如果您的检测结果与阴性或阳性样例均不匹配, 应使用新试剂重新进行检测。